

Italiano:Compresa fredda calda

Hinweis: Fare clic qui per le istruzioni per l'uso in formato pdf.

Inhaltsverzeichnis

1 Istruzioni per l'uso della compressa di gel freddo-caldo	1
1.1 Ambiti di applicazione	1
1.1.1 Impacto freddo:	1
1.1.2 Impacco caldo:	2
1.2 Indicazioni per l'applicazione	2
1.3 Avvertenze e indicazioni di sicurezza	2
1.4 Pulizia:	3
1.5 Smaltimento	3
1.6 Notifica di eventi	3
1.6.1 Besondere Hinweise:	3
1.6.2 Produttore:	5
1.6.3 Appendice:	5

Istruzioni per l'uso della compressa di gel freddo-caldo

La compressa caldo-freddo è un prodotto medico di applicazione esterna su pelle intatta, per alleviare e trattare i dolori, destinato all'uso in cliniche, studi medici, ambiente domestico e per il tempo libero. Si tratta di una compressa di gel riutilizzabile da impiegare per la terapia caldo/freddo.

Ambiti di applicazione

Impacto freddo:

Lasciare la compressa per ca. 2 ore nello scomparto surgelati del frigorifero o nel freezer.

L'impacco freddo offre sollievo locale dai dolori e riduce il gonfiore. Può essere applicato per:

- infiammazioni acute di articolazioni e muscoli
- traumi
- lividi
- punture d'insetto

- mal di denti
- contusioni
- gonfiori
- slogature
- mal die testa
- sangue dal naso
- cottature leggeres

Impacco caldo:

Riscaldare la compressa nel microonde o in acqua calda secondo questo schema:

Compressa	Microonde a 600W	Bagnomaria a 80°C
30x40	4:00 minuti	4:00 minuti
21x38	3:00 minuti	4:00 minuti
16x26	4:00 minuti	4:00 minuti
12x29	2:00 minuti	4:00 minuti
7,5x35	2:00 minuti	4:00 minuti
13x14	0:55 minuti	2:00 minuti
7,5x13	0:25 minuti	2:00 minuti
7,5x52	1:00 minuti	1:00 minuti

L'impacco caldo stimola l'irrorazione sanguigna locale e scioglie le tensioni. Può essere applicato per:

- indolenzimento muscolare
- mal die schiena
- dolori menstruali

Indicazioni per l'applicazione

Non applicare mai la compressa direttamente sulla pelle. Inserire sempre un panno tra compressa e pelle.

Nessuna applicazione più lunga di 20 minuti, con una pausa di 30 minuti tra le applicazioni!

Avvertenze e indicazioni di sicurezza

La compressa caldo-freddo è destinata solo all'applicazione esterna.

In caso di malattie circolatorie, del cuore e di diabete consultare sempre un medico.

Non applicare su bambini, persone indifese, con problemi di sensibilità e conservare lontano dalla loro portata

Non fare pressione, in nessun caso utilizzare una compressa danneggiata, che ad es. perde.

Nei bambini e nelle persone con limitazioni cognitive utilizzare solo sotto supervisione e conservare lontano dalla loro portata!

Dopo assunzione con ingestione sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

Pulizia:

Lavare a mano con sapone neutro prima dell'applicazione. Non utilizzare disinfettanti o altri solventi per la pulizia.

Smaltimento

È possibile smaltire la compressa insieme ai normali rifiuti domestici.

Notifica di eventi

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione all'impacco freddo-caldo al produttore (e-mail: qm@cundv.de) e alle autorità competenti.

Besondere Hinweise:

	Numero del lotto di produzione
	Data di produzione
	Produttore



Prodotto medico




Riscaldamento in microonde - Rispettare l'indicazione dei tempi secondo tabella "Indicazione dei tempi di riscaldamento" per la relativa misura.

CH REP

Rapresentante svizzero



Non utilizzare più se l'imballo è danneggiato

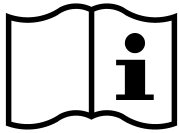

Rispettare le istruzioni per l'uso

Conservare!



Attenzione



Tidyman



Partner di vendita

	<p>Codice articolo</p>
	<p>Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden</p>
	<p>Proteggere dalla radiazione solare</p>
	<p>Importatore</p>

Produttore:

C+V Pharma Depot GmbH
 Bockhorster Landweg 15
 33775 Versmold

Appendice:

IT Istruzioni per l'uso della compressa di gel freddo-caldo