

C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray

Ausgabe: 04.02.2026

Letzte Änderung: 13.07.2025

Seite von

C+V Pharma/Elektrodenkontaktspray

[Hauptseite](#)

Inhaltsverzeichnis

- [1 Produktbeschreibung](#)
- [2 Anwendungsbereiche](#)
- [3 Anwendungshinweise](#)
- [4 Kontraindikationen](#)
- [5 Sicherheitshinweise](#)
- [6 Zusammensetzung](#)
- [7 Meldung von Vorkommnissen](#)
- [8 Gebindegrößen](#)
 - [8.1 Sprühflasche](#)
 - [8.2 Kanister](#)
 - [8.3 Cubitainer](#)
- [9 Gebrauchsanweisung](#)
- [10 Nachfüllanweisung](#)
- [11 Sicherheitsdatenblatt](#)
- [12 Konformitätserklärung](#)

Produktbeschreibung

Das CV-TRONIC Elektrodenkontaktspray ist ein nicht steriles, elektrisch leitfähiges Elektrolyt, das speziell für die Anwendung auf EKG-, EMG- und EEG-Elektroden entwickelt wurde. Es ist bakterienhemmend und wasserlöslich, wodurch es leicht mit einem angefeuchteten Tuch entfernt werden kann. Das Produkt ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung geeignet und nicht für Defibrillationsverfahren vorgesehen.

Anwendungsbereiche

Das Kontaktspray kann auf intakter, unbeschädigter Haut verwendet werden und ist für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Es gibt keine Ausschlüsse für bestimmte Patientengruppen.

Anwendungshinweise

- Sprühen Sie das Kontaktspray auf die Haut oder die Elektrode auf.

- Bringen Sie die Elektroden gemäß den Anweisungen des Herstellers des elektromedizinischen Geräts an.
- Nach Anbruch ist das Produkt 6 Monate haltbar.

Kontraindikationen

- Nicht bei Defibrillationsverfahren oder auf beschädigter Haut anwenden.
- Allergien sollten vor der Anwendung mit dem Patienten geklärt werden.

Sicherheitshinweise

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Bei empfindlichen Personen können in seltenen Fällen vorübergehende Hautreizungen auftreten.
- Beschädigte Verpackungen dürfen nicht verwendet werden.
- Um eine Kontamination zu vermeiden, darf die Zerstäuberdüse nicht mit Patienten, Personal oder Instrumenten in Kontakt kommen.
- Entsorgen Sie das Produkt, falls die Verpackung beschädigt ist oder Anzeichen einer Kontamination vorliegen.
- Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Zusammensetzung

Aqua, Isopropyl Alcohol, Sodium Chloride, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Meldung von Vorkommnissen

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Elektrodenkontaktspray sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Gebindegrößen

Sprühflasche

250 ml

Kanister

2 Liter

Cubitainer

5 Liter

Gebrauchsanweisung

[Download Gebrauchsanweisung Elektordenkontaktspray](#)

Nachfüllanweisung

[Download Nachfüllanweisung Cubitainer](#)

Sicherheitsdatenblatt

[Download Sicherheitsdatenblatt Elektrodenspray mit Alkohol](#)

Konformitätserklärung

[Download Konformitätserklärung Elektrodenkontaktspray](#)