

C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse

[Hauptseite](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung	1
2 Anwendungsanweisungen	1
2.1 Kaltanwendung	1
2.2 Warmanwendung	1
3 Sicherheits- und Warnhinweise	2
4 Reinigung	2
4.1 Zusammensetzung	2
4.2 Meldung von Vorkommnissen	2
5 Produktgrößen	2
6 Gebrauchsanweisung	3
6.1 Download weitere Sprachen	4
7 Sicherheitsdatenblatt	4
8 Konformitätserklärung	4

Produktbeschreibung

Die Kalt/Warm Kompresse ist ein wiederverwendbares Medizinprodukt zur Linderung und Behandlung von Schmerzen. Sie wird in der Kälte- und Wärmetherapie eingesetzt und ist für den Gebrauch in Kliniken, Praxen, Haushalten und in der Freizeit geeignet.

Anwendungsanweisungen

Kaltanwendung

Die Kompresse sollte etwa zwei Stunden im Gefrierfach oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden. Sie wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend und ist geeignet für akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln, stumpfe Verletzungen, Blutergüsse, Insektenstiche, Zahnschmerzen, Prellungen, Schwellungen, Verstauchungen, Kopfschmerzen, Nasenbluten und leichte Verbrennungen.

Warmanwendung

Die Kompresse sollte etwa vier Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser gelegt werden. Sie wirkt lokal durchblutungsfördernd und spannungslösend und ist geeignet für Muskelkater, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.

Sicherheits- und Warnhinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung bei intakter Haut.

Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 20 Minuten, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Nicht bei Kindern, hilflosen oder empfindungsgestörten Personen anwenden und unzugänglich aufbewahren.

Keine beschädigte Kompresse verwenden. Bei Auslaufen oder Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Reinigung

Die Kompresse sollte vor der Anwendung per Hand mit milder Seife gewaschen werden. Keine Desinfektionsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

Zusammensetzung

Wässriges Gel (Wasser, Propylenglykol, Polyacrylsäure, UV-Stabilisator, Konservierungsmittel, Zitronensäure, Natriumhydroxid und ggf. Farbstoffe)

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

Meldung von Vorkommnissen


Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktgrößen

7,5 x 13

7,5 x 35

7,5 x 52

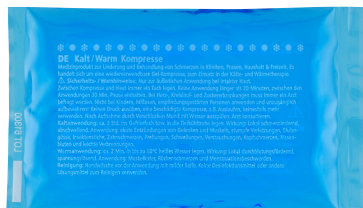

13 x 14

12 x 29

16 x 26

21 x 38

30 x 40

Gebrauchsanweisung

[Download Gebrauchsanweisung Kalt-Warm-Kompresse](#)

Download weitere Sprachen

[English](#)

[Español](#)

[Français](#)

[Italiano](#)

[Nederlands](#)

[Polski](#)

[Slovenská](#)

[Suomi](#)

Sicherheitsdatenblatt

[Download Sicherheitsdatenblatt Kalt-Warm-Kompresse](#)

Konformitätserklärung

[Download Konformitätserklärung Kalt-Warm-Kompresse](#)