

# C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

Hauptseite

## Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung und Anwendung .....	1
2 Anwendungshinweise .....	1
3 Sicherheits- und Warnhinweise .....	1
4 Lagerung .....	1
5 Entsorgung .....	2
6 Zusammensetzung .....	2
7 Meldung von Vorkommnissen .....	2
8 Produktgrößen .....	2
9 Gebrauchsanweisung .....	2
9.1 Download weitere Sprachen .....	2
10 Sicherheitsdatenblatt .....	3
11 Konformitätserklärung .....	3

## Produktbeschreibung und Anwendung

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Sie dient zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in verschiedenen Situationen wie Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Zahnschmerzen.

## Anwendungshinweise

Die Kompresse sollte niemals direkt auf die Haut gelegt werden; ein Tuch sollte immer dazwischen sein. Die Anwendung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit bestimmten Erkrankungen wie dem Raynaud-Syndrom. Bei versehentlichem Verschlucken oder Kontakt mit Augen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

## Lagerung

Die Kompresse sollte zwischen 5°C und 35°C gelagert werden und vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden.

## Entsorgung

---

Nach Gebrauch oder bei Beschädigung sollte die Kompresse über den Restmüll entsorgt werden.

## Zusammensetzung

---

Außenbeutel (PA/PE-Verbundfolie, bedruckt), innenliegend Wasserbeutel und Kalkammonsalpeter.

.

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

## Meldung von Vorkommnissen

---

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: [qm@cundv.de](mailto:qm@cundv.de)) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## Produktgrößen

---

15 x 17

15 x 25



## Gebrauchsanweisung

---

[Download Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse](#)

## Download weitere Sprachen

---

[Italiano](#)

[Français](#)

[Nederlands](#)

## Sicherheitsdatenblatt

---

[Download Sicherheitsdatenblatt Kälte-Sofort-Kompresse](#)

## Konformitätserklärung

---

[Download Konformitätserklärung Kälte-Sofort-Kompresse](#)