

# C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

Ausgabe: 27.06.2026

Letzte Änderung: 10.03.2026

Seite von

## C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

[Hauptseite](#)

### Inhaltsverzeichnis

- [1 Produktbeschreibung und Anwendung](#)
- [2 Anwendungshinweise](#)
- [3 Sicherheits- und Warnhinweise](#)
- [4 Lagerung](#)
- [5 Entsorgung](#)
- [6 Zusammensetzung](#)
- [7 Meldung von Vorkommnissen](#)
- [8 Produktgrößen](#)
- [9 Gebrauchsanweisung](#)
  - [9.1 Download weitere Sprachen](#)
- [10 Sicherheitsdatenblatt](#)
- [11 Konformitätserklärung](#)

### Produktbeschreibung und Anwendung

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Sie dient zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in verschiedenen Situationen wie Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Zahnschmerzen.

### Anwendungshinweise

Die Kompresse sollte niemals direkt auf die Haut gelegt werden; ein Tuch sollte immer dazwischen sein. Die Anwendung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit bestimmten Erkrankungen wie dem Raynaud-Syndrom. Bei versehentlichem Verschlucken oder Kontakt mit Augen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

## **Lagerung**

Die Kompresse sollte zwischen 5°C und 35°C gelagert werden und vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden.

## **Entsorgung**

Nach Gebrauch oder bei Beschädigung sollte die Kompresse über den Restmüll entsorgt werden.

## **Zusammensetzung**

Außenbeutel (PA/PE-Verbundfolie, bedruckt), innenliegend Wasserbeutel und Urea.

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

## **Meldung von Vorkommnissen**

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: [qm@cundv.de](mailto:qm@cundv.de)) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## **Produktgrößen**

15 x 17

15 x 25

## **Gebrauchsanweisung**

[Download Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse](#)

**Download weitere Sprachen**

[Italiano](#)

[Français](#)

[Nederlands](#)

## **Sicherheitsdatenblatt**

[Download Sicherheitsdatenblatt Kälte-Sofort-Kompresse](#)

## **Konformitätserklärung**

[Download Konformitätserklärung Kälte-Sofort-Kompresse](#)