

C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

Ausgabe: 27.06.2026

Letzte Änderung: 10.03.2026

Seite von

C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

[Hauptseite](#)

Inhaltsverzeichnis

- [1 Produktbeschreibung und Anwendung](#)
- [2 Anwendungshinweise](#)
- [3 Sicherheits- und Warnhinweise](#)
- [4 Lagerung](#)
- [5 Entsorgung](#)
- [6 Zusammensetzung](#)
- [7 Meldung von Vorkommnissen](#)
- [8 Produktgrößen](#)
- [9 Gebrauchsanweisung](#)
 - [9.1 Download weitere Sprachen](#)
- [10 Sicherheitsdatenblatt](#)
- [11 Konformitätserklärung](#)

Produktbeschreibung und Anwendung

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Sie dient zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in verschiedenen Situationen wie Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Zahnschmerzen.

Anwendungshinweise

Die Kompresse sollte niemals direkt auf die Haut gelegt werden; ein Tuch sollte immer dazwischen sein. Die Anwendung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit bestimmten Erkrankungen wie dem Raynaud-Syndrom. Bei versehentlichem Verschlucken oder Kontakt mit Augen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

Lagerung

Die Kompresse sollte zwischen 5°C und 35°C gelagert werden und vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden.

Entsorgung

Nach Gebrauch oder bei Beschädigung sollte die Kompresse über den Restmüll entsorgt werden.

Zusammensetzung

Außenbeutel (PA/PE-Verbundfolie, bedruckt), innenliegend Wasserbeutel und Kalkammonsalpeter.

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

Meldung von Vorkommnissen

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktgrößen

15 x 17

15 x 25

Gebrauchsanweisung

[Download Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse](#)

Download weitere Sprachen

[Italiano](#)

[Français](#)

[Nederlands](#)

Sicherheitsdatenblatt

[Download Sicherheitsdatenblatt Kälte-Sofort-Kompresse](#)

Konformitätserklärung

[Download Konformitätserklärung Kälte-Sofort-Kompresse](#)