

# C+V Pharma/Antibeslagmittel Libver medical

Ausgabe: 07.05.2026

Letzte Änderung: 11.07.2025

Seite von

## C+V Pharma/Antibeslagmittel Libver medical

### Inhaltsverzeichnis

- [1 Produktbeschreibung](#)
- [2 Anwendungsbereiche](#)
- [3 Anwendungshinweise](#)
- [4 Kontraindikationen](#)
- [5 Sicherheitshinweise](#)
- [6 Zusammensetzung](#)
- [7 Meldung von Vorkommnissen](#)
- [8 Gebindegrößen](#)
- [9 Gebrauchsanweisung](#)
- [10 Sicherheitsdatenblatt](#)
- [11 Konformitätserklärung](#)

### Produktbeschreibung

**Libver Medical** ist ein steriles Antibeslagmittel, das speziell für medizinische Optiken entwickelt wurde. Es verhindert zuverlässig das Beschlagen von Oberflächen durch die Bildung einer klaren, transparenten Schutzschicht.

### Anwendungsbereiche

- Medizinische Optiken, insbesondere in der aseptischen Endoskopie (z. B. Laparoskopie, Thorakoskopie, Arthroskopie).
- Untersuchungsspiegel und Optiken wie Larynxspiegel, Epipharynxspiegel, Stroboskope, zahnärztliche Spiegel und Koloskope.

### Anwendungshinweise

- Nur durch medizinisches Fachpersonal anwenden.
- Vor der ersten Entnahme sicherstellen, dass der Schutzring um den Gummistopfen unbeschädigt ist.
- Entnahme nur mit sterilen Spritzen oder durch vorsichtiges Öffnen des Gummistopfens, wenn der Gummistopfen geöffnet wurde, dann ist das Produkt nur zum Einmaligen Gebrauch.
- Lösung auf die desinfizierte und trockene Oberfläche auftragen und gleichmäßig verteilen.
- Nach Verdunsten mit steriler Gaze sanft nachpolieren.

### Kontraindikationen

Keine spezifischen Kontraindikationen bekannt.

## **Sicherheitshinweise**

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht zur Injektion geeignet.
- Leicht entzündbar.
- Kontakt mit Augen kann in seltenen Fällen zu Reizungen führen.

## **Zusammensetzung**

Alcohol, Aqua, Dimethicone Copolyol

## **Meldung von Vorkommnissen**

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit Libver Medical sollten dem Hersteller (E-Mail: [qm@bad-apotheke.com](mailto:qm@bad-apotheke.com)) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## **Gebindegrößen**

- 30 ml Durchstechflasche

## **Gebrauchsanweisung**

## **Sicherheitsdatenblatt**

[Download Sicherheitsdatenblatt Anitbeschlagnittel Libver medical](#)

## **Konformitätserklärung**

[Download Konformitätserklärung](#)

[Download Confirmation Letter](#)