



# C+V Pharma/Antibeslagmittel Libver medical

## Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung .....	1
2 Anwendungsbereiche .....	1
3 Anwendungshinweise .....	1
4 Kontraindikationen .....	1
5 Sicherheitshinweise .....	2
6 Zusammensetzung .....	2
7 Meldung von Vorkommnissen .....	2
8 Gebindegrößen .....	2
9 Gebrauchsanweisung .....	2
10 Sicherheitsdatenblatt .....	2
11 Konformitätserklärung .....	3

## Produktbeschreibung

**Libver Medical** ist ein steriles Antibeslagmittel, das speziell für medizinische Optiken entwickelt wurde. Es verhindert zuverlässig das Beschlagen von Oberflächen durch die Bildung einer klaren, transparenten Schutzschicht.

## Anwendungsbereiche

- Medizinische Optiken, insbesondere in der aseptischen Endoskopie (z. B. Laparoskopie, Thorakoskopie, Arthroskopie).
- Untersuchungsspiegel und Optiken wie Larynxspiegel, Epipharynxspiegel, Stroboskope, zahnärztliche Spiegel und Koloskope.

## Anwendungshinweise

- Nur durch medizinisches Fachpersonal anwenden.
- Vor der ersten Entnahme sicherstellen, dass der Schutzring um den Gummistopfen unbeschädigt ist.
- Entnahme nur mit sterilen Spritzen oder durch vorsichtiges Öffnen des Gummistopfens, wenn der Gummistopfen geöffnet wurde, dann ist das Produkt nur zum Einmaligen Gebrauch.
- Lösung auf die desinfizierte und trockene Oberfläche auftragen und gleichmäßig verteilen.
- Nach Verdunsten mit steriler Gaze sanft nachpolieren.

## Kontraindikationen

Keine spezifischen Kontraindikationen bekannt.



## Sicherheitshinweise

---

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht zur Injektion geeignet.
- Leicht entzündbar.
- Kontakt mit Augen kann in seltenen Fällen zu Reizungen führen.

## Zusammensetzung

---

Alcohol, Aqua, Dimethicone Copolyol

## Meldung von Vorkommnissen

---

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit Libver Medical sollten dem Hersteller (E-Mail: [qm@bad-apotheke.com](mailto:qm@bad-apotheke.com)) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## Gebindegrößen

---

- 30 ml Durchstechflasche



## Gebrauchsanweisung

---

## Sicherheitsdatenblatt

---

[Download Sicherheitsdatenblatt Anitbeslagmittel Libver medical](#)



## Konformitätserklärung

---

[Download Konformitätserklärung](#)

[Download Confirmation Letter](#)