# C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

### Hauptseite

Inhaltsverzeichnis	
1 Produktbeschreibung und Anwendung	1
2 Anwendungshinweise	1
3 Sicherheits- und Warnhinweise	1
4 Lagerung	1
5 Entsorgung	2
6 Zusammensetzung	2
7 Meldung von Vorkommnissen	
8 Produktgrößen	
9 Gebrauchsanweisung	3
9.1 Download weitere Sprachen	3
10 Sicherheitsdatenblatt	3
11 Konformitätserklärung	3

# Produktbeschreibung und Anwendung

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Sie dient zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in verschiedenen Situationen wie Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Zahnschmerzen.

# Anwendungshinweise

Die Kompresse sollte niemals direkt auf die Haut gelegt werden; ein Tuch sollte immer dazwischen sein. Die Anwendung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit bestimmten Erkrankungen wie dem Raynaud-Syndrom. Bei versehentlichem Verschlucken oder Kontakt mit Augen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

### Lagerung

Die Kompresse sollte zwischen 5°C und 35°C gelagert werden und vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden.

Ausgabe: 31.10.2025 Letzte Änderung: 03.06.2025





### **Entsorgung**

Nach Gebrauch oder bei Beschädigung sollte die Kompresse über den Restmüll entsorgt werden.

### Zusammensetzung

Außenbeutel (PA/PE-Verbundfolie, bedruckt), innenliegend Wasserbeutel und Kalkammonsalpeter

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

## Meldung von Vorkommnissen

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

# Produktgrößen

15 x 17

15 x 25





Ausgabe: 31.10.2025 Letzte Änderung: 03.06.2025





## Gebrauchsanweisung

### Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in Kliniken, Praxen, Haushalt und Freizeit.

### Anwendungsbereich

Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken, Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln zur Vermischung des Inhalts

Die Kompresse wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend.

Zur Behandlung von:

- Verbrennungen
- Blutergüsse Lokale Schmerzbetäubung Verstauchungen
- Schwellungen
  - Zerrungen

### Anwendungshinweise:

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 30 Minuten, zwischen Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten.

### ⚠ Sicherheits- und Warnhinweise

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht Anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Kindern unter 3 Jahren hilflosen, empfindungsgestörten Personen und Raynaud-Syndrom, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beutelinhalts viel Wasser trinken und einen

Sollte der Inhalt auf die Haut oder ins Auge gelangen, Kompresse entfernen und betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt konsultieren.

Kompresse nicht öffnen. Beschädigte Kompresse nicht mehr verwenden.

Kompresse nach Gebrauch oder bei Beschädigung über den Restmüll direkt

Sie sollten iedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit den Kälte-Sofort-Kompressen auftritt, dem Hersteller unter (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Nicht unter 5°C oder über 35°C lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

### Besondere Hinweise:





### C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15 33775 Versmold Fon: +49 (5424) 21 64 40 Fax: +49 (5424) 21 64 34 Mail: info@cundv.de www.cundv.de



Revision: 2024-07-05

### Download Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse

## Download weitere Sprachen

Italiano

Français

**Nederlands** 

### Sicherheitsdatenblatt

Download Sicherheitsdatenblatt Kälte-Sofort-Kompresse

# Konformitätserklärung

Download Konformitätserklärung Kälte-Sofort-Kompresse

Ausgabe: 31.10.2025 Letzte Änderung: 03.06.2025

