



Inhaltsverzeichnis

1. C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse	2
2. Datei:GBA KSK Französisch.pdf	5



C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

Hauptseite

Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung und Anwendung	2
2 Anwendungshinweise	2
3 Sicherheits- und Warnhinweise	2
4 Lagerung	2
5 Entsorgung	3
6 Zusammensetzung	3
7 Meldung von Vorkommnissen	3
8 Produktgrößen	3
9 Gebrauchsanweisung	4
9.1 Download weitere Sprachen	4
10 Sicherheitsdatenblatt	4
11 Konformitätserklärung	4

Produktbeschreibung und Anwendung

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Sie dient zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in verschiedenen Situationen wie Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Zahnschmerzen.

Anwendungshinweise

Die Kompresse sollte niemals direkt auf die Haut gelegt werden; ein Tuch sollte immer dazwischen sein. Die Anwendung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit bestimmten Erkrankungen wie dem Raynaud-Syndrom. Bei versehentlichem Verschlucken oder Kontakt mit Augen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

Lagerung

Die Kompresse sollte zwischen 5°C und 35°C gelagert werden und vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden.



Entsorgung

Nach Gebrauch oder bei Beschädigung sollte die Kompresse über den Restmüll entsorgt werden.

Zusammensetzung

Außenbeutel (PA/PE-Verbundfolie, bedruckt), innenliegend Wasserbeutel und Urea.

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

Meldung von Vorkommnissen

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktgrößen

15 x 17

15 x 25



Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in Kliniken, Praxen, Haushalt und Freizeit.

Anwendungsbereich

Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken, Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln zur Vermischung des Inhalts.

Die Kompresse wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend.

Zur Behandlung von:

- Verbrennungen
- Blutergüsse
- Lokale Schmerzbetäubung
- Verstauchungen
- Schwellungen
- Krämpfe
- Zerrungen
- Zahnschmerzen

Anwendungshinweise:

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 30 Minuten, zwischen Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten.

⚠ Sicherheits- und Warnhinweise

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht Anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen und Raynaud-Syndrom, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beutelinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren.

Sollte der Inhalt auf die Haut oder ins Auge gelangen, Kompresse entfernen und betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt konsultieren.

Kompresse nicht öffnen. Beschädigte Kompresse nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Kompresse nach Gebrauch oder bei Beschädigung über den Restmüll direkt entsorgen.


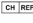










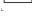
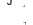


Meldung von Vorkommnissen

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit den Kälte-Sofort-Kompressen auftritt, dem Hersteller unter (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Lagerung:

Nicht unter 5°C oder über 35°C lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Besondere Hinweise:

	Medizinprodukt		Schweizer Repräsentant
	Hersteller		Importeur
	Herstellungsdatum		Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Vertriebspartner		Bei Beschädigter Verpackung nicht mehr verwenden
	Fertigungslosnummer		Tidyman
	Artikelnummer		Vor Regen schützen
	Gebrauchsanweisung beachten Bitte aufbewahren!		Nicht wiederverwenden
	Achtung		Lagerung zwischen 5 – 35 °C



C+V Pharma Depot GmbH
Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold
Fon: +49 (5424) 21 64 40
Fax: +49 (5424) 21 64 34
Mail: info@cundv.de
www.cundv.de

Revision: 2024-07-05



[Download Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse](#)

[Download weitere Sprachen](#)

[Italiano](#)

[Français](#)

[Nederlands](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Download Sicherheitsdatenblatt Kälte-Sofort-Kompresse](#)

[Konformitätserklärung](#)

[Download Konformitätserklärung Kälte-Sofort-Kompresse](#)



Datei:GBA KSK Französisch.pdf

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: **800 × 566 Pixel**. Weitere Auflösung: **320 × 226 Pixel**.
[Originaldatei](#) (1.754 × 1.240 Pixel, Dateigröße: 163 KB, MIME-Typ: application/pdf)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	17:55, 28. Mai 2025		1.754 × 1.240 (163 KB)	Benutzer (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.



Dateiverwendung

Diese Datei wird auf keiner Seite verwendet.

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf	Nina Janzen
Software	Microsoft® Word für Microsoft 365
Umwandlungsprogramm	Microsoft® Word für Microsoft 365
Verschlüsselt	no
Papierformat	841,92 x 595,32 pts (A4)
Version des PDF-Formats	1,7