



# Inhaltsverzeichnis

---

1. C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse .....	2
2. Datei:Deutsch:GBA KWK 2023-06-20.pdf .....	7



# C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse

Hauptseite

## Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung .....	2
2 Anwendungsanweisungen .....	2
2.1 Kaltanwendung .....	2
2.2 Warmanwendung .....	2
3 Sicherheits- und Warnhinweise .....	3
4 Reinigung .....	3
4.1 Zusammensetzung .....	3
4.2 Meldung von Vorkommnissen .....	3
5 Produktgrößen .....	3
6 Gebrauchsanweisung .....	5
6.1 Download weitere Sprachen .....	5
7 Sicherheitsdatenblatt .....	5
8 Konformitätserklärung .....	6

## Produktbeschreibung

Die Kalt/Warm Kompresse ist ein wiederverwendbares Medizinprodukt zur Linderung und Behandlung von Schmerzen. Sie wird in der Kälte- und Wärmetherapie eingesetzt und ist für den Gebrauch in Kliniken, Praxen, Haushalten und in der Freizeit geeignet.

## Anwendungsanweisungen

### Kaltanwendung

Die Kompresse sollte etwa zwei Stunden im Gefrierfach oder in der Tiefkühltruhe aufbewahrt werden. Sie wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend und ist geeignet für akute Entzündungen von Gelenken und Muskeln, stumpfe Verletzungen, Blutergüsse, Insektenstiche, Zahnschmerzen, Prellungen, Schwellungen, Verstauchungen, Kopfschmerzen, Nasenbluten und leichte Verbrennungen.

### Warmanwendung

Die Kompresse sollte etwa vier Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser gelegt werden. Sie wirkt lokal durchblutungsfördernd und spannungslösend und ist geeignet für Muskelkater, Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden.



## Sicherheits- und Warnhinweise

---

Nur zur äußerlichen Anwendung bei intakter Haut.

Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 20 Minuten, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden.

Nicht bei Kindern, hilflosen oder empfindungsgestörten Personen anwenden und unzugänglich aufbewahren.

Keine beschädigte Kompresse verwenden. Bei Auslaufen oder Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

## Reinigung

---

Die Kompresse sollte vor der Anwendung per Hand mit milder Seife gewaschen werden. Keine Desinfektionsmittel oder Lösungsmittel verwenden.

## Zusammensetzung

---

Wässriges Gel (Wasser, Propylenglykol, Polyacrylsäure, UV-Stabilisator, Konservierungsmittel, Zitronensäure, Natriumhydroxid und ggf. Farbstoffe)

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

## Meldung von Vorkommnissen

---

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: [qm@cundv.de](mailto:qm@cundv.de)) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.


## Produktgrößen

---

7,5 x 13

7,5 x 35



7,5 x 52

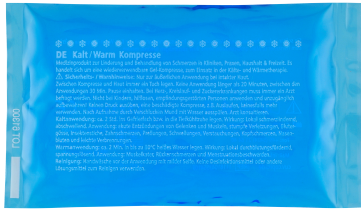

13 x 14


12 x 29

16 x 26

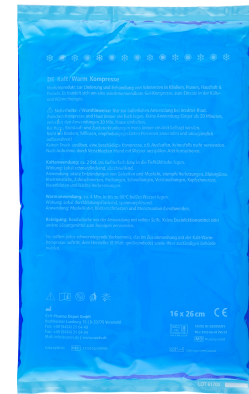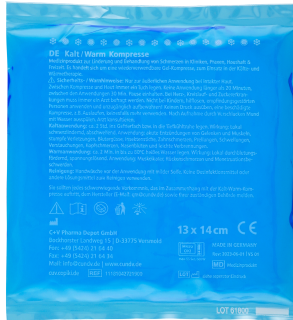

21 x 38


30 x 40

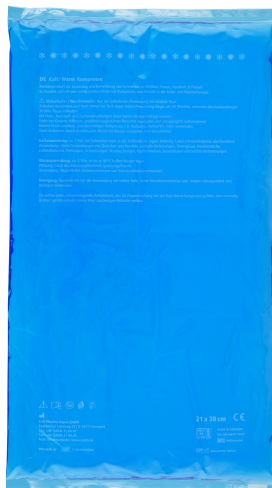



## Gebrauchsanweisung

---

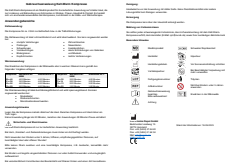

[Download Gebrauchsanweisung Kalt-Warm-Kompresse](#)

## Download weitere Sprachen

---

[English](#)

[Español](#)

[Français](#)

[Italiano](#)

[Nederlands](#)

[Polski](#)

[Slovenská](#)

[Suomi](#)

## Sicherheitsdatenblatt

---

[Download Sicherheitsdatenblatt Kalt-Warm-Kompresse](#)



## Konformitätserklärung


---

[Download Konformitätserklärung Kalt-Warm-Kompresse](#)



# Datei:Deutsch:GBA KWK 2023-06-20.pdf

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

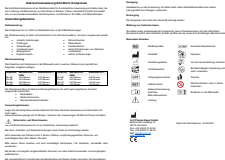

Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: **800 × 566 Pixel**. Weitere Auflösung: **320 × 226 Pixel**.  
[Originaldatei](#) (1.754 × 1.240 Pixel, Dateigröße: 85 KB, MIME-Typ: application/pdf)

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	<a href="#">14:31, 23. Nov. 2023</a>		1.754 × 1.240 (85 KB)	<a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a>	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.



## Dateiverwendung

---

Die folgende Datei ist ein Duplikat dieser Datei ([weitere Details](#)):

- [Datei:GBA KWK 2023-06-20.pdf](#)

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [C+V Pharma/Kalt-Warm-Kompresse](#)

## Metadaten

---

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

<b>Fotograf</b>	Nina Janzen
<b>Software</b>	Microsoft® Word für Microsoft 365
<b>Umwandlungsprogramm</b>	Microsoft® Word für Microsoft 365
<b>Verschlüsselt</b>	no
<b>Papierformat</b>	841,92 x 595,32 pts (A4)
<b>Version des PDF-Formats</b>	1,7