



Inhaltsverzeichnis

1. Datei:GBA KSK.pdf	2
2. Benutzer:Njanzen	4
3. C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse	5

Datei:GBA KSK.pdf

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in Kliniken, Praxen, Haushalt und Freizeit.

Anwendungsbereich

Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken, Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln zur Vermischung des Inhalts.

Die Kompresse wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend.

Zur Behandlung von:

- Verbrennungen
- Blutergüsse
- Lokale Schmerzbetäubung
- Verstauchungen
- Schwellungen
- Krämpfe
- Zerrungen
- Zahnschmerzen

Anwendungshinweise:

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 30 Minuten, zwischen Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten.

⚠ Sicherheits- und Warnhinweise

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht Anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen und Raynaud-Syndrom, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beutelinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren.

Sollte der Inhalt auf die Haut oder ins Auge gelangen, Kompresse entfernen und betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt konsultieren.

Kompresse nicht öffnen. Beschädigte Kompresse nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Kompresse nach Gebrauch oder bei Beschädigung über den Restmüll direkt entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit den Kälte-Sofort-Kompressen auftritt, dem Hersteller unter (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Lagerung:

Nicht unter 5°C oder über 35°C lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Besondere Hinweise:

	Medizinprodukt		Schweizer Repräsentant
	Hersteller		Importeur
	Herstellungsdatum		Vor Sonneneinstrahlung schützen
	Vertriebspartner		Bei Beschädigter Verpackung nicht mehr verwenden
	Fertigungslosnummer		Tidyman
	Artikelnummer		Vor Regen schützen
	Gebrauchsanweisung beachten		Nicht wiederverwenden
	Bitte aufbewahren!		Lagerung zwischen 5 – 35 °C
	Achtung		



C+V Pharma Depot GmbH

 Bockhorster Landweg 15

 33775 Versmold

 Fon: +49 (5424) 21 64 40

 Fax: +49 (5424) 21 64 34

 Mail: info@cundv.de

www.cundv.de

Revision: 2024-07-05



Größe der JPG-Vorschau dieser PDF-Datei: 800 × 566 Pixel. Weitere Auflösung: 320 × 226 Pixel. Originaldatei (1.754 × 1.240 Pixel, Dateigröße: 62 KB, MIME-Typ: application/pdf)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:18, 17. Mai 2025	<p>Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse</p> <p>Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in Kliniken, Praxen, Haushalt und Freizeit.</p> <p>Anwendungsbereich</p> <p>Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken, Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln zur Vermischung des Inhalts.</p> <p>Die Kompresse wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend.</p> <p>Zur Behandlung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbrennungen • Blutergüsse • Lokale Schmerzbetäubung • Verstauchungen • Schwellungen • Krämpfe • Zerrungen • Zahnschmerzen <p>Anwendungshinweise:</p> <p>Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und</p>	1.754 × 1.240 (62 KB)	(Diskussion Beiträge)	<p>Entsorgung:</p> <p>Kompresse nach Gebrauch oder bei Beschädigung über den Restmüll direkt entsorgen.</p> <p>Meldung von Vorkommnissen</p> <p>Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit den Kälte-Sofort-Kompressen auftritt, dem Hersteller unter (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.</p> <p>Lagerung:</p> <p>Nicht unter 5°C oder über 35°C lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.</p> <p>Besondere Hinweise:</p> <p>Medizinprodukt Hersteller</p> <p>Herstellungsdatum</p>

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben

Ausgabe: 17.06.2025

Letzte Änderung:



Seite 2 von 7



Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Umwandlungsprogramm macOS Version 15,4,1 (Build 24E263) Quartz PDFContext

Verschlüsselt no

Papierformat 841,92 x 595,2 pts (A4)

Version des PDF-Formats 1,3



Benutzer:Njanzen

Vorlage:User



C+V Pharma/Kälte-Sofort-Kompresse

Hauptseite

Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung und Anwendung	5
2 Anwendungshinweise	5
3 Sicherheits- und Warnhinweise	5
4 Lagerung	5
5 Entsorgung	6
6 Zusammensetzung	6
7 Meldung von Vorkommnissen	6
8 Produktgrößen	6
9 Gebrauchsanweisung	7
9.1 Download weitere Sprachen	7
10 Sicherheitsdatenblatt	7
11 Konformitätserklärung	7

Produktbeschreibung und Anwendung

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut. Sie dient zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in verschiedenen Situationen wie Verbrennungen, Blutergüssen, Verstauchungen und Zahnschmerzen.

Anwendungshinweise

Die Kompresse sollte niemals direkt auf die Haut gelegt werden; ein Tuch sollte immer dazwischen sein. Die Anwendung sollte nicht länger als 30 Minuten dauern, mit einer Pause von 30 Minuten zwischen den Anwendungen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Produkt ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen sollte ein Arzt konsultiert werden. Es ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren oder Personen mit bestimmten Erkrankungen wie dem Raynaud-Syndrom. Bei versehentlichem Verschlucken oder Kontakt mit Augen sollte sofort ein Arzt konsultiert werden.

Lagerung

Die Kompresse sollte zwischen 5°C und 35°C gelagert werden und vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit geschützt werden.



Entsorgung

Nach Gebrauch oder bei Beschädigung sollte die Kompresse über den Restmüll entsorgt werden.

Zusammensetzung

Außenbeutel (PA/PE-Verbundfolie, bedruckt), innenliegend Wasserbeutel und Kalkammonsalpeter

Das Gel wird in einen bedruckten Beutel (PA/PE-Verbundfolie) gefüllt.

Meldung von Vorkommnissen

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Kompresse sollten dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

Produktgrößen

15 x 17

15 x 25





Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist ein Medizinprodukt zur einmaligen äußerlichen Anwendung auf intakter Haut, die zur Linderung und Behandlung von Schmerzen und Schwellungen in Kliniken, Praxen, Haushalt und Freizeit.

Anwendungsbereich

Beutel an der markierten Stelle zusammendrücken, Innenbeutel zum Platzen bringen und heftig schütteln zur Vermischung des Inhalts.

Die Kompresse wirkt lokal schmerzlindernd und abschwellend.

Zur Behandlung von:

- Verbrennungen
- Blutergüsse
- Lokale Schmerzbetäubung
- Verstauchungen
- Schwellungen
- Krämpfe
- Zerrungen
- Zahnschmerzen

Anwendungshinweise:

Legen Sie die Kompresse niemals direkt auf die Haut. Zwischen Kompresse und Haut immer ein Tuch legen.

Keine Anwendung länger als 30 Minuten, zwischen Anwendungen 30 Minuten Pause einhalten.

Sicherheits- und Warnhinweise

Die Kälte-Sofort-Kompresse ist nur zur äußerlichen Anwendung auf intakter Haut bestimmt.

Bei Herz-, Kreislauf- und Zuckererkrankungen muss immer ein Arzt befragt werden.

Nicht Anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen, Kindern unter 3 Jahren, hilflosen, empfindungsgestörten Personen und Raynaud-Syndrom, auf beschädigter Haut oder offenen Wunden.

Bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Personen nur unter Aufsicht anwenden und unzugänglich aufbewahren!

Bei versehentlichem Verschlucken des Beutelinhalts viel Wasser trinken und einen Arzt konsultieren.

Sollte der Inhalt auf die Haut oder ins Auge gelangen, Kompresse entfernen und betroffene Stelle gründlich mit Wasser spülen und ggf. einen Arzt konsultieren.

Kompresse nicht öffnen. Beschädigte Kompresse nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Kompresse nach Gebrauch oder bei Beschädigung über den Restmüll direkt entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit den Kälte-Sofort-Kompressen auftritt, dem Hersteller unter (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Lagerung:

Nicht unter 5°C oder über 35°C lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Besondere Hinweise:



Medizinprodukt



Schweizer Repräsentant



Hersteller



Importeur



Herstellungsdatum



Vor Sonneneinstrahlung schützen



Vertriebspartner



Bei Beschädigter Verpackung nicht mehr verwenden



Fertigungslosnummer



Tidyman



Artikelnummer



Vor Regen schützen



Gebrauchsanweisung beachten



Nicht wiederverwenden



Achtung



Lagerung zwischen 5 – 35 °C



C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold

Fon: +49 (5424) 21 64 40

Fax: +49 (5424) 21 64 34

Mail: info@cundv.de

www.cundv.de

Revision: 2024-07-05



[Download Gebrauchsanweisung Kälte-Sofort-Kompresse](#)

[Download weitere Sprachen](#)

[Italiano](#)

[Français](#)

[Nederlands](#)

[Sicherheitsdatenblatt](#)

[Download Sicherheitsdatenblatt Kälte-Sofort-Kompresse](#)

[Konformitätserklärung](#)

[Download Konformitätserklärung Kälte-Sofort-Kompresse](#)