



# Inhaltsverzeichnis

---

1. Datei:LIBVER 01.jpg .....	2
2. Benutzer:Njanzen .....	4
3. C+V Pharma .....	5
4. C+V Pharma/Antibeslagmittel Libver medical .....	8

## Datei:LIBVER 01.jpg

---

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung



Größe dieser Vorschau: 489 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 196 × 240 Pixel | 836 × 1.024 Pixel.

[Originaldatei](#) (836 × 1.024 Pixel, Dateigröße: 67 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

## Dateiversionen

---

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.



	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommen tar
aktue ll	09:20, 8. Jul. 2025		836 × 1.024 (67 KB)	<a href="#">Benutzer</a> ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [C+V Pharma](#)
- [C+V Pharma/Antibeslagmittel Libver medical](#)



# Benutzer:Njanzen

---


Vorlage:User



# C+V Pharma



## C+V Pharma-Depot GmbH

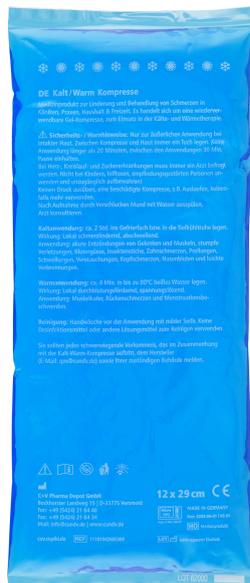







# C+V Pharma/Antibeschlagmittel Libver medical

## Inhaltsverzeichnis

1 Produktbeschreibung .....	8
2 Anwendungsbereiche .....	8
3 Anwendungshinweise .....	8
4 Kontraindikationen .....	8
5 Sicherheitshinweise .....	9
6 Zusammensetzung .....	9
7 Meldung von Vorkommnissen .....	9
8 Gebindegrößen .....	9
9 Gebrauchsanweisung .....	9
10 Sicherheitsdatenblatt .....	9
11 Konformitätserklärung .....	10

## Produktbeschreibung

**Libver Medical** ist ein steriles Antibeschlagmittel, das speziell für medizinische Optiken entwickelt wurde. Es verhindert zuverlässig das Beschlagen von Oberflächen durch die Bildung einer klaren, transparenten Schutzschicht.

## Anwendungsbereiche

- Medizinische Optiken, insbesondere in der aseptischen Endoskopie (z. B. Laparoskopie, Thorakoskopie, Arthroskopie).
- Untersuchungsspiegel und Optiken wie Larynxspiegel, Epipharynxspiegel, Stroboskope, zahnärztliche Spiegel und Koloskope.

## Anwendungshinweise

- Nur durch medizinisches Fachpersonal anwenden.
- Vor der ersten Entnahme sicherstellen, dass der Schutzring um den Gummistopfen unbeschädigt ist.
- Entnahme nur mit sterilen Spritzen oder durch vorsichtiges Öffnen des Gummistopfens, wenn der Gummistopfen geöffnet wurde, dann ist das Produkt nur zum Einmaligen Gebrauch.
- Lösung auf die desinfizierte und trockene Oberfläche auftragen und gleichmäßig verteilen.
- Nach Verdunsten mit steriler Gaze sanft nachpolieren.

## Kontraindikationen

Keine spezifischen Kontraindikationen bekannt.

## Sicherheitshinweise

---

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht zur Injektion geeignet.
- Leicht entzündbar.
- Kontakt mit Augen kann in seltenen Fällen zu Reizungen führen.

## Zusammensetzung

---

Alcohol, Aqua, Dimethicone Copolyol

## Meldung von Vorkommnissen

---

Schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit Libver Medical sollten dem Hersteller (E-Mail: [qm@bad-apotheke.com](mailto:qm@bad-apotheke.com)) und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## Gebindegrößen

---

- 30 ml Durchstechflasche



## Gebrauchsanweisung

---

## Sicherheitsdatenblatt

---

[Download Sicherheitsdatenblatt Anitbeschlagmittel Libver medical](#)



## Konformitätserklärung

---

[Download Konformitätserklärung](#)

[Download Confirmation Letter](#)