



# Inhaltsverzeichnis

---

--



# Italiano:Compresa fredda calda

**Hinweis:** Fare clic qui per le istruzioni per l'uso in formato pdf.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Istruzioni per l'uso della compressa di gel freddo-caldo</b> .....	2
1.1 Ambiti di applicazione .....	2
1.1.1 Impacto freddo: .....	2
1.1.2 Impacco caldo: .....	3
1.2 Indicazioni per l'applicazione .....	3
1.3 Avvertenze e indicazioni di sicurezza .....	3
1.4 Pulizia: .....	4
1.5 Smaltimento .....	4
1.6 Notifica di eventi .....	4
1.6.1 Besondere Hinweise: .....	4
1.6.2 Produttore: .....	6
1.6.3 Appendice: .....	6

## Istruzioni per l'uso della compressa di gel freddo-caldo

La compressa caldo-freddo è un prodotto medico di applicazione esterna su pelle intatta, per alleviare e trattare i dolori, destinato all'uso in cliniche, studi medici, ambiente domestico e per il tempo libero. Si tratta di una compressa di gel riutilizzabile da impiegare per la terapia caldo /freddo.

### Ambiti di applicazione

#### Impacto freddo:

Lasciare la compressa per ca. 2 ore nello scomparto surgelati del frigorifero o nel freezer.

L'impacco freddo offre sollievo locale dai dolori e riduce il gonfiore. Può essere applicato per:

- infiammazioni acute di articolazioni e muscoli
- traumi
- lividi
- punture d'insetto
- mal di denti
- contusioni



- gonfiori
- slogature
- mal die testa
- sangue dal naso
- cottature leggeres

## Impacco caldo:

Riscaldare la compresa nel microonde o in acqua calda secondo questo schema:

Compresa	Microonde a 600W	Bagnomaria a 80°C
30x40	4:00 minuti	4:00 minuti
21x38	3:00 minuti	4:00 minuti
16x26	4:00 minuti	4:00 minuti
12x29	2:00 minuti	4:00 minuti
7,5x35	2:00 minuti	4:00 minuti
13x14	0:55 minuti	2:00 minuti
7,5x13	0:25 minuti	2:00 minuti
7,5x52	1:00 minuti	1:00 minuti

L'impacco caldo stimola l'irrorazione sanguigna locale e scioglie le tensioni. Può essere applicato per:

- indolenzimento muscolare
- mal die schiena
- dolori mestruali

## Indicazioni per l'applicazione

Non applicare mai la compresa direttamente sulla pelle. Inserire sempre un panno tra compresa e pelle.

Nessuna applicazione più lunga di 20 minuti, con una pausa di 30 minuti tra le applicazioni!

## Avvertenze e indicazioni di sicurezza

La compresa caldo-freddo è destinata solo all'applicazione esterna.

In caso di malattie circolatorie, del cuore e di diabete consultare sempre un medico.

Non applicare su bambini, persone indifese, con problemi di sensibilità e conservare lontano dalla loro portata

Non fare pressione, in nessun caso utilizzare una compressa danneggiata, che ad es. perde.

Nei bambini e nelle persone con limitazioni cognitive utilizzare solo sotto supervisione e conservare lontano dalla loro portata!

Dopo assunzione con ingestione sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

### Pulizia:

Lavare a mano con sapone neutro prima dell'applicazione. Non utilizzare disinfettanti o altri solventi per la pulizia.




### Smaltimento

È possibile smaltire la compressa insieme ai normali rifiuti domestici.

### Notifica di eventi

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione all'impacco freddo-caldo al produttore (e-mail: [qm@cundv.de](mailto:qm@cundv.de)) e alle autorità competenti.


### Besondere Hinweise:

	<p>Numero del lotto di produzione</p>
	<p>Data di produzione</p>
	<p>Produttore</p>
	<p>Prodotto medico</p>
<p>Riscaldamento in microonde - Rispettare l'indicazione dei tempi</p>	



	secondo tabella "Indicazione dei tempi di riscaldamento" per la relativa misura.
	Rapresentante svizzero
	Non utilizzare più se l'imballo è danneggiato
	Rispettare le istruzioni per l'uso Conservare!
	Attenzione
	Tidyman
	Partner di vendita
	Codice articolo
	Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden



	Proteggere dalla radiazione solare
	Importatore

**Produttore:**

---

C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold

**Appendice:**

---

IT Istruzioni per l'uso della compresa di gel freddo-caldo