

Instrucțiuni de utilizare Gel cu ultrasunete

Gelul de contact este un gel nesteril, solubil în apă și care nu se colorează, care este destinat exclusiv utilizării externe și poate fi utilizat cu dispozitive cu ultrasunete disponibile în comerț.

Domenii de aplicare:

Agentul de contact pentru terapia cu ultrasunete și diagnosticare poate fi utilizat pe pielea intactă, nedeteriorată, pentru a realiza o conductivitate de la sonda la corpul uman cu cât mai puține pierderi posibil. Gelul de contact este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății. Pe baza constatărilor disponibile, nu există excluderea grupurilor de pacienți.

Aplicare:

Distribuiți cantitatea necesară de gel pe suprafața pielii din regiunea corpului care urmează să fie examinată și/sau pe sonda cu ultrasunete. Efectuarea examenului/terapii cu ultrasunete. Apoi îndepărtați gelul de pe sonda cu ultrasunete și de pe suprafața corpului pacientului cu o cârpă moale. Perioada de valabilitate este de 6 luni de la deschidere.

Contraindicații:

Gelul este destinat numai uzului extern și nu trebuie utilizat pentru următoarele aplicații:

- Proceduri invazive în care se introduce un dispozitiv prin țesut.
- Orice proceduri pe sau în apropierea pielii deteriorate.

Ingrediente: Apa, glicerina, carbomer, hidroxid de sodiu, propilenglicol, alcool benzilic, metilcloroizotiazolinona, metilisotiazolinona, acid citric



INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ / Precauții

În cazuri rare, gelurile de contact pot provoca iritații temporare ale pielii la persoanele sensibile.

Alergiile trebuie clarificate cu pacientul în prealabil.

Pentru a evita contaminarea, vârfurile recipientelor/tuburilor nu trebuie să intre în contact cu pacienții, personalul sau instrumentele.

Aruncați produsul dacă ambalajul este deteriorat sau există semne de contaminare.

Ștergeți recipientul după utilizare. Pentru dozatoare și recipiente de reumplere, urmați instrucțiunile de utilizare atașate sau protocolul unității dumneavoastră, dacă acestea diferă.

Raportarea incidentelor

Ar trebui să raportați producătorului orice incident grav care are loc în legătură cu gelul cu ultrasunete (E-mail: qm@cundv.de) și autoritatea dumneavoastră responsabilă.

Instrucțiuni speciale

MD

Dispozitiv medical



Producător



Data de fabricație



Protejați de lumina soarelui

LOT

Numărul lotului de producție



Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat



Tidyman



Respectați instrucțiunile de utilizare
Vă rugăm să păstrați!

REF

Numărul articolului



Atenție
Numai pentru uz extern.
Cu cremă hidratantă



C+V Pharma Depot GmbH
Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold
Fon: +49 (5424) 21 64 40



Stadiul informațiilor: 25/05/2023