

Istruzioni per l'uso della compressa caldo-freddo

La compressa caldo-freddo è un prodotto medico di applicazione esterna su pelle intatta, per alleviare e trattare i dolori, destinato all'uso in cliniche, studi medici, ambiente domestico e per il tempo libero. Si tratta di una compressa di gel riutilizzabile da impiegare per la terapia caldo/freddo.

Ambiti di applicazione

Impacco freddo:

Lasciare la compressa per ca. 2 ore nello scomparto surgelati del frigorifero o nel freezer.

L'impacco freddo offre sollievo locale dai dolori e riduce il gonfiore. Può essere applicato per:

- infiammazioni acute di articolazioni e muscoli
- traumi
- lividi
- punture d'insetto
- mal di denti
- contusioni
- gonfiori
- slogature
- mal di testa
- sangue dal naso
- scottature leggere

Impacco caldo:

Riscaldare la compressa nel microonde o in acqua calda secondo questo schema:

Compressa	Microonde a 600W	Bagnomaria a 80°C	Compressa	Microonde a 600W	Bagnomaria a 80°C
30 x 40	4:00 minuti	4:00 minuti	7,5 x 35	2:00 minuti	4:00 minuti
21 x 38	3:00 minuti	4:00 minuti	13 x 14	0:55 minuti	2:00 minuti
16 x 26	4:00 minuti	4:00 minuti	7,5 x 13	0:25 minuti	2:00 minuti
12 x 29	2:00 minuti	4:00 minuti	7,5 x 52	1:00 minuto	1:00 minuto

L'impacco caldo stimola l'irrorazione sanguigna locale e scioglie le tensioni. Può essere applicato per:

- indolenzimento muscolare
- mal di schiena
- dolori mestruali

Indicazioni per l'applicazione

Non applicare mai la compressa direttamente sulla pelle. Inserire sempre un panno tra compressa e pelle.

Nessuna applicazione più lunga di 20 minuti, con una pausa di 30 minuti tra le applicazioni!



Avvertenze e indicazioni di sicurezza

La compressa caldo-freddo è destinata solo all'applicazione esterna.

In caso di malattie circolatorie, del cuore e di diabete consultare sempre un medico.

Non applicare su bambini, persone indifese, con problemi di sensibilità e conservare lontano dalla loro portata

Non fare pressione, in nessun caso utilizzare una compressa danneggiata, che ad es. perde.

Nei bambini e nelle persone con limitazioni cognitive utilizzare solo sotto supervisione e conservare lontano dalla loro portata!

Dopo assunzione con ingestione sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico.

Pulizia

Lavare a mano con sapone neutro prima dell'applicazione. Non utilizzare disinfettanti o altri solventi per la pulizia.

Smaltimento

È possibile smaltire la compressa insieme ai normali rifiuti domestici.

Notifica di eventi

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione all'impacco freddo-caldo al produttore (e-mail: qm@cundv.de) e alle autorità competenti.

Indicazioni particolari



Prodotto medico



Rappresentante svizzero



Produttore



Importatore



Data di produzione



Non utilizzare più se l'imballo è danneggiato



Partner di vendita



Tidyman



Numero del lotto di produzione



Proteggere dalla radiazione solare



Codice articolo



Non applicare su bambini di età inferiore a 3 anni



Rispettare le istruzioni per l'uso
Conservare!



Riscaldamento in microonde -
Rispettare l'indicazione dei tempi secondo tabella "Indicazione dei tempi di riscaldamento" per la relativa misura.



Attenzione



C+V Pharma Depot GmbH
Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold
Fon: +49 (5424) 21 64 40
Fax: +49 (5424) 21 64 34
Mail: info@cundv.de
www.cundv.de



Ultimo aggiornamento delle informazioni:
20230518