

Gebruiksaanwijzing koud/warm kompres

Het koud/warm kompres is een medisch hulpmiddel voor uitwendig gebruik op een intacte huid voor verlichting en de behandeling van pijn, geschikt voor gebruik in ziekenhuis, (para)medische praktijk, thuis of in de vrije tijd. Het gaat hierbij om een herbruikbaar gelkompres voor zowel koude- als warmtebehandeling.

Toepassing

Koudebehandeling

Het kompres ca. 2 uur in het vriesvak of de vriezer leggen.

Het kompres zorgt lokaal voor verlichting van de pijn en vermindering van de zwelling. Te gebruiken bij:

- acute ontstekingen van spieren en gewrichten
- gesloten wonden
- bloeduitstortingen
- insectenbeten
- kiespijn
- kneuzingen
- zwellingen
- verstuikingen
- hoofdpijn
- bloedneus
- lichte brandwonden

Warmtebehandeling

Verwarm het kompres volgens onderstaande voorschriften in de magnetron of warm water:

Kompres	In de magnetron, 600 W	In water, 80 °C	Kompres	In de magnetron, 600 W	In water, 80 °C
30 x 40	04:00 minuten	04:00 minuten	7,5 x 35	02:00 minuten	04:00 minuten
21 x 38	03:00 minuten	04:00 minuten	13 x 14	00:55 minuten	02:00 minuten
16 x 26	04:00 minuten	04:00 minuten	7,5 x 13	00:25 minuten	02:00 minuten
12 x 29	02:00 minuten	04:00 minuten	7,5 x 52	01:00 minute	01:00 minute

Het kompres zorgt lokaal voor bevordering van de doorbloeding en ontspanning. Te gebruiken bij:

- stijve spieren
- rugklachten
- menstratieklachten

Gebruiksaanwijzing

Leg het kompres nooit direct op de huid. Altijd een doek tussen kompres en huid leggen. Niet langer dan 20 minuten gebruiken, tussen de behandelingen 30 minuten pauzeren.



Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen

Het koud/warm kompres is uitsluitend voor uitwendig gebruik!

Bij hart- en vaatziekten of suikerziekte altijd een arts raadplegen.

Niet bij kinderen, hulpbehoevende personen of personen met sensorische aandoeningen gebruiken en buiten hun bereik houden.

Geen druk uitoefenen en een beschadigd kompres dat bijvoorbeeld lekt niet meer gebruiken.

Bij kinderen of personen met een verstandelijke beperking alleen onder toezicht gebruiken en buiten hun bereik houden!

Na inslikken de mond met water spoelen. Een arts raadplegen.

Reinigen

Voor gebruik met milde zeep op de hand wassen. Geen desinfectiemiddelen of andere oplosmiddelen gebruiken.

Milieu

Het kompres kan met het huisvuil worden meegegeven.

Melden van incidenten

U moet elk ernstig incident in verband met het koud-warm kompres melden aan de fabrikant (e-mail: qm@cundv.de) en aan uw bevoegde autoriteit.

Bijzondere aanwijzingen



Medisch hulpmiddel



Zwitserse gemachtigde vertegenwoordiger



Fabrikant



Importeur



Productiedatum



Niet gebruiken als het artikel beschadigd is.



Verkooppartner



Tidyman



Batchcode



Tegen zonlicht beschermen.



Artikelnummer



Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.



Gebruiksaanwijzing in acht nemen.
Goed bewaren!



Verwarmen in de magnetron - Zie de 'Aanbevolen verwarmingstijden' voor het betreffende formaat.



Let op!



C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold

Fon: +49 (5424) 21 64 40

Fax: +49 (5424) 21 64 34

Mail: info@cundv.de

www.cundv.de



Versie informatie: 20230518