

Gebrauchsanweisung Elektrodenkontaktspray

Nicht steriles, elektrisch leitfähiges Elektrolyt zum Aufsprühen. Bakteriostatisch. Für die äußerliche Anwendung auf EKG-, EMG- und EEG-Elektroden. Nicht für die Defibrillation geeignet.

Anwendungsbereiche

Das Elektrodenkontaktspray kann auf intakter, unbeschädigter Haut verwendet werden. Das Kontaktspray ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse gibt es keinen Ausschluss von Patientengruppen.

Anwendung

Sprühen Sie das Kontaktspray auf die Haut oder die Elektrode auf und bringen Sie die Elektroden an. Für Informationen zur Verwendung des Kontaktsprays mit dem jeweiligen Produkt ziehen Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers des elektromedizinischen Geräts heran. Das Kontaktspray ist wasserlöslich und kann mit einem angefeuchteten, weichen Tuch entfernt werden. Nach Anbruch 6 Monate haltbar.

Kontraindikation

Das Spray ist ausschließlich für die äußerliche Anwendung bestimmt und sollte bei folgenden Anwendungen nicht verwendet werden:

- Nicht bei Defibrillationsverfahren anwenden.
- Jegliche Verfahren auf oder in der Nähe von beschädigter Haut.

Ingredients: Aqua, Isopropyl Alcohol, Natrium Chloride, Propylene Glycol, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone



HINWEISE FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG / Vorsichtsmaßnahmen

In seltenen Fällen kann das Kontaktspray bei empfindlichen Personen zu vorübergehenden Hautreizungen führen. Allergien sollten mit dem Patienten vorab geklärt werden.

Um eine Produktkontamination zu vermeiden, dürfen die Zerstäuberdüse oder die Pumpe zum Nachfüllen des Spenders nicht mit Patienten, Personal oder Instrumenten in Kontakt kommen.

Entsorgen Sie das Produkt, falls die Verpackung beschädigt ist oder Anzeichen einer Kontamination vorliegt.

Für Spender und Nachfüllbehälter befolgen Sie die beigefügten Gebrauchsanweisungen oder das Protokoll Ihrer Einrichtung, falls sich diese unterscheiden.

Meldung von Vorkommnissen

Sie sollten jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit dem Elektrodenkontaktspray auftritt, dem Hersteller (E-Mail: qm@cundv.de) sowie Ihrer zuständigen Behörde melden.

Das Elektrodenkontaktspray wird in den folgenden Gebindegrößen angeboten.

250 ml Sprühflasche

2 l Kanister

5 l Cubitainer

Besondere Hinweise



Medizinprodukt



Hersteller



Herstellungsdatum



Vertriebspartner



Fertigungslosnummer



Artikelnummer



Achtung
Nur zur äußerlichen
Anwendung.
Mit Feuchthalter



C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold

Fon: +49 (5424) 21 64 40

Fax: +49 (5424) 21 64 34

Mail: info@cundv.de

www.cundv.de



Schweizer Repräsentant



Importeur



Vor Sonneneinstrahlung schützen



Bei Beschädigter Verpackung nicht mehr verwenden



Tidyman



Gebrauchsanweisung beachten
Bitte aufbewahren!

Stand der Informationen: 01.10.2024