

Brugsanvisning til ultralydsgel

Kontaktgelen er en ikke-steril, vandopløselig og ikke-farvende gel, der udelukkende er beregnet til udvortes brug og kan bruges sammen med kommercielt tilgængelige ultralydsenheder.

Anvendelsesområder

Kontaktmidlet til ultralydsbehandling og -diagnose kan bruges på intakt, ikke-skadet hud til at opnå en helt tabsfri overførsel af ultralyd til kroppen. Kontaktgelen må udelukkende bruges af medicinsk fagpersonale. De foreliggende oplysninger giver ingen anledning til udelukkelse af patientgrupper.

Anvendelse

Påfør hudoverfladen i det område, der skal undersøges, og/eller ultralydssonden den påkrævede mængde gel. Gennemførelse af ultralydsundersøgelsen/-behandlingen. Efterfølgende fjernes gelen fra ultralydssonden og patient-/kropsområdet ved hjælp af en blød klud.

Holdbar i 6 måneder efter åbning.

Kontraindikationer

Gelen er udelukkende beregnet til udvortes brug og må ikke bruges ved følgende anvendelser:

- Invasive indgreb, hvorved en anordning skal indføres gennem væv.
- Ethvert indgreb på eller i nærheden af skadet hud.

Ingredienser: vand, glycerin, carbomer, natriumhydroxid, propylenglykol, benzylalkohol, methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon, citronsyre



ANVISNINGER FOR SIKKER ANVENDELSE / Forholdsregler

I sjældne tilfælde kan kontaktgeler føre til forbigående hudirritation hos følsomme personer. Eventuelle allergier skal afklares med patienterne forud.

Kontamination undgås ved at sørge for, at spidserne på beholder/rør ikke kommer i kontakt med patienter, personale eller instrumenter.

Produktet skal bortskaffes, hvis emballagen er beskadiget, eller der forekommer tegn på kontamination.

Aftør vippelåget efter brug. I forbindelse med dispenser og efterfyldningsbeholder skal de medfølgende brugsanvisninger følges og overholdes. Hvis der er uoverensstemmelser med din facilitets protokoller, skal de sidstnævnte overholdes og følges.

Rapportering af hændelser

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med ultralydsgelen, skal rapporteres til producenten (e-mail: qm@cundv.de) samt de ansvarlige myndigheder.

Ultralydsgelen fås i følgende emballagestørrelser.

250 g dispenserflaske
500 g dispenserflaske
1000 g dispenserflaske

5 kg Cubitainer
10 kg Cubitainer
5 kg dunk
10 kg dunk

Særlige anvisninger



Medicinalprodukt



Producent



Produktionsdato



Driftspartner



Produktionspartinummer



Artikelnummer



OBS!
Kun til udvortes brug.
Med fugtighedsbevaring



C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15
33775 Versmold
Tlf.: +49 (5424) 21 64 40
Fax: +49 (5424) 21 64 34
E-mail: info@cundv.de
www.cundv.de



Repræsentant i Schweiz



Importør



Skal beskyttes mod sollys



Må ikke længere anvendes, hvis
emballagen er beskadiget



Skraldespand, Mand, Affald



Følg brugervejledningen
Skal opbevares!

Oplysningsstatus: 25.05.2023