

Instructions d'utilisation de la compresse froide instantanée

La compresse froide instantanée est un produit médical à usage externe unique, à poser sur une peau intacte pour soulager et traiter les douleurs et les enflures dans les cliniques, les cabinets médicaux, à la maison et pendant les loisirs.

Domaine d'application

Pressez le sachet au point marqué, éclatez le sachet intérieur et secouez vigoureusement pour mélanger le contenu.

La compresse a un effet analgésique et décongestionnant local.

Pour les applications suivantes :

- brûlures
- ecchymoses
- anesthésie locale
- entorses
- enflures
- crampes
- déchirures
- mal de dents

Consignes d'application :

Ne jamais poser la compresse directement sur la peau. Toujours mettre un torchon entre la compresse et la peau.

Ne pas utiliser plus de 30 minutes sans interruption ; appliquer une pause de 30 minutes entre les applications.



Consignes de sécurité et avertissements

La compresse froide instantanée est uniquement destinée à un usage externe sur une peau intacte.

Consultez toujours un médecin en cas de maladie cardiaque, circulatoire ou diabétique.

Ne pas utiliser chez les personnes présentant des troubles circulatoires artériels, les enfants de moins de 3 ans, les personnes invalides, les personnes insensibles ou les patients présentant le syndrome de Raynaud, ni sur une peau endommagée ou sur des plaies ouvertes.

Lorsqu'il s'agit d'enfants et de personnes souffrant de troubles cognitifs, utiliser uniquement sous surveillance et ranger hors de leur portée !

Si vous avalez accidentellement le contenu du sachet, buvez beaucoup d'eau et consultez un médecin.

Si le contenu entre en contact avec la peau ou les yeux, retirez la compresse et rincez abondamment la zone affectée avec de l'eau ; consultez un médecin si nécessaire.

Ne pas ouvrir la compresse. Ne plus utiliser une compresse abîmée.

Élimination :

Jeter la compresse directement à la poubelle après utilisation ou si elle est endommagée.

Déclaration d'incident

Signalez tout incident grave survenant avec les compresses froides instantanées au fabricant à l'adresse (courriel : gm@cundv.de) et à votre autorité responsable.

Conservation :

Ne pas conserver en dessous de 5 °C ni au-dessus de 35 °C. Protéger du soleil et de l'humidité.

Consignes spéciales :

	Produit médical		Représentant pour la Suisse
	Fabricant		Importateur
	Date de fabrication		Ne pas exposer au soleil
	Distributeur		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Numéro de lot de fabrication		Tidy man
	Numéro d'article		Protéger de la pluie
	Respectez les instructions d'utilisation À conserver !		Ne pas réutiliser
	Attention		Conserver entre 5 °C et 35 °C



C+V Pharma Depot GmbH

Bockhorster Landweg 15

33775 Versmold

Téléphone : +49 (5424) 21 64 40

Télécopie : +49 (5424) 21 64 34

Courriel : info@cundv.de

www.cundv.de





MedNet SWISS GmbH

D4 Platz 4

6039 Root D4

Suisse

Révision : 2024-07-05